



DIAGNOSTICA DR. TILOCCA S.r.l.
Laboratori Analisi Cliniche Riuniti
Spec. in Microbiologia/Genetica Medica/Patologia G
GELA: C/SO S. Aldisio, 264/268 (Sede Centrale)
TEL/FAX 0933-937699/824949

GELA: Via Europa, 61/63 Tel . 0933/834534

LICATA: Corso Roma, 42 Via S. Domenico, 5
Tel. 0922/1803109 Fax 0922/1924055
infoanalisitilocca@virgilio.it

1.1 MATERIALE CERVICO VAGINALE

1.1.1 Pap test convenzionale

- Utilizzare un unico vetrino con angoli smussati e banda sabbata;
- scrivere a matita nome, cognome e data di nascita della paziente sulla banda sabbata;
- strisciare il materiale sul vetrino in modo da avere uno strato il più possibile sottile, senza macroaggregati - il materiale deve essere strisciato sullo stesso lato sul quale è scritto: cognome, nome e data di nascita;
- il vetrino deve essere subito fissato con citospray;
- il vetrino deve essere posto in portavetrini idonei (eventualmente da richiedere a magazzino);
- qualora venga utilizzato un unico portavetrini per più campioni le superfici dei vetrini non devono essere a contatto.

E' necessario compilare la scheda d'accettazione in tutte le sue parti.

1.1.2 Pap Test in fase liquida: THIN-PREP, FULL PAP, P16 e L1, COMBI PAP, REFLEX PAP

Il materiale citologico deve essere inviato stemperato nell'apposito contenitore con fissativo, che viene fornito dal nostro magazzino.

Il cyto-brush dopo il prelievo deve essere agitato energicamente, direttamente nel contenitore (Thin Prep) e strisciato lungo le pareti in modo da far staccare il maggior numero di cellule possibile.

Non lasciare il cyto-brush all'interno del contenitore (Thin Prep)

Scrivere in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome, cognome e data di nascita della paziente sull'etichetta del contenitore Thin Prep.

E' necessario compilare la scheda d'accettazione in tutte le sue parti.

1.1.3 Ricerca HPV – Metodo PCR

Se l'esame richiesto è associato al Pap in fase liquida (Thin Prep) è sufficiente il materiale raccolto nel contenitore della fase liquida. In caso di sola ricerca e tipizzazione HPV con metodo PCR senza esecuzione del Pap-Test, inviare i campioni direttamente al reparto di Biologia Molecolare.

1.2 MATERIALE ENDOMETRIALE

1.2.2 Citologico Endometriale convenzionale

Il materiale citologico viene strisciato su un unico vetrino con angoli smussati e banda sabbata sulla quale, dallo stesso lato del materiale strisciato, devono essere riportati nome e cognome (scritto solo a matita) della paziente.

Il vetrino deve essere subito fissato con citospray e inviato in laboratorio in portavetrini idonei.

Se presente più di un campione è importante che le superfici dei vetrini non siano a contatto.

E' necessario compilare la scheda d'accettazione in tutte le sue parti.

1.2.3 Citologico Endometriale in fase liquida

Il materiale citologico deve essere inviato stemperato nell'apposito contenitore (Thin Prep Preserv Cyt Solution) con fissativo fornito dal nostro magazzino.

Scrivere in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome, cognome e data di nascita della paziente sull'etichetta del contenitore.

E' necessario compilare la scheda d'accettazione in tutte le sue parti.